



PMD-ME-22-145-AR
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH8832- WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: 00 28 888 43 41+ | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

(A R) العربية

الضمان

- 5 سنوات إذا تم استخدامه على النحو المنشود وإذا تم احترام التحذيرات
- يغطي هذا الضمان العيوب المادية وعيوب التصنيع
- لا يغطي هذا الضمان التغييرات الخارجيه الشكلية الناتجة عن البلى العادي الذي لا يؤثر على أداء المنتج ، أو الأضرار الناجمة عن سوء استخدام المنتج


كيفية تغيير الفلتر

أخرج الفلتر (الصورة 2) بحذر وبدون قوة لاستبداله وأدخل فلتر اللون المطلوب كما هو موضح في الصورة 3.
أمسك الحلقة الخارجية للمرشح بدلاً من العدسة.

كيف ننظف الفلتر (صورة 4)

- 1 لا تستخدم أي مواد كيميائية (مثل كحول الأيزوبروبيل) لتنظيف الجانب الداخلي أو الخارجي من السطح الزجاجي وحلقة الفلتر
- 2 قم بتخزين الفلتر في حقيبة واقية لمنع تراكم الغبار وتغير اللون بسبب التعرض لأشعة الشمس
- 3 الفلتر مصنوع من الزجاج الهش ، لذا يجب التعامل معه بحذر
- 4 لا يسمح للمستخدم بإزالة عدسة الفلتر

- 1 قم بإزالة الفلتر من الجهاز عن طريق الضغط على الحلقة الخارجية للفلتر
- 2 استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة وخالية من النسالة لتجنب خدش السطح الزجاجي
- 3 جفف الفلتر بقطعة قماش أخرى خالية من النسالة

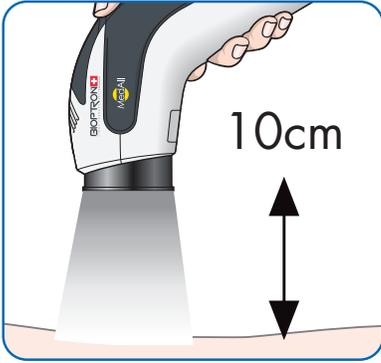

1



2



3



4



BIOPTRON® 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

المرشحات

(A R) العربية